

Установка ПО «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2»


ВНИМАНИЕ! Программа привязывается к конфигурации конкретного ПК, его ПО и наименованию учреждения, поэтому для работы на нескольких ПК, перенос после обновления «железа» или переустановке ОС Windows, **установку и получение лицензии нужно будет производить вновь.**

1. Вставьте загрузочный диск или зайдите на сайт www.myocard.ru в раздел «ПРОГРАММЫ» и скачайте дистрибутив МИОКАРД-ХОЛТЕР 2. Далее подпункты актуальны для скачивания программы с сайта, при наличии диска можно переходить к п.2.

1.1. На сайте выбрать вкладку «программы»



- 1.2. Далее скачать дистрибутив программы МИОКАРД-ХОЛТЕР 2. Если на вашем ПК стоит ОС Windows XP, то скачать соответствующий дистрибутив.

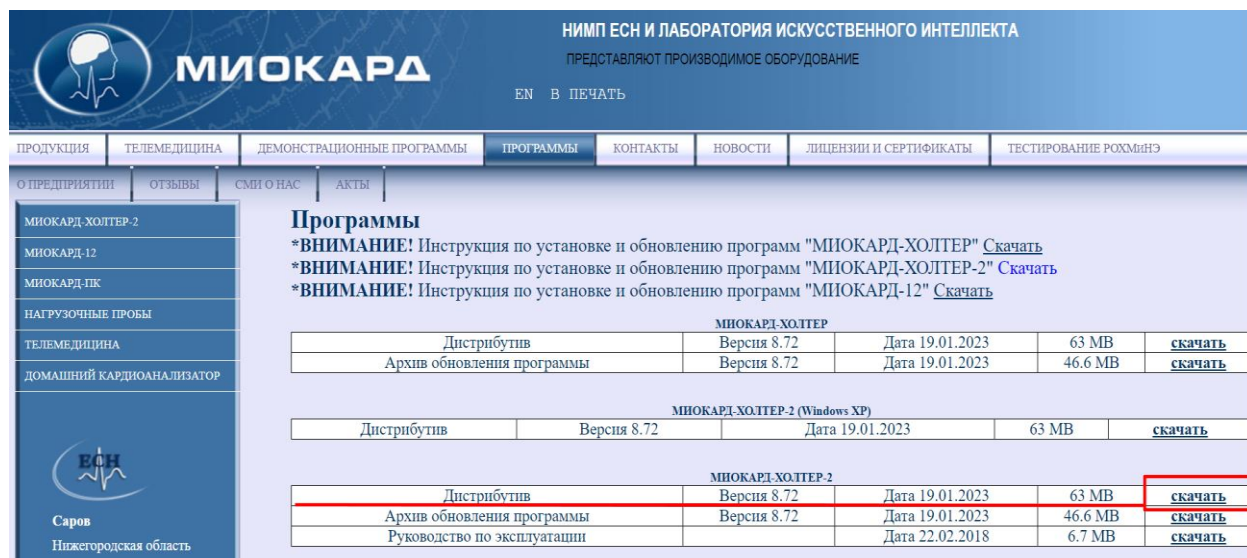


1.3. Далее скачанный файл необходимо **извлечь из архива** и зайти в папку.


2. Запустить установку открыв файл «Install.exe».

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
backup	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
dtafb	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
Firebird	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
Fonts	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
FTDI Driver_2006	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
FTDIDriver_2014	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
FTDIDriverInstall	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
UDF	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
Updater	13.09.2022 9:15	Папка с файлами	
autorun.inf	13.09.2022 9:05	Сведения для уст...	1 КБ
hview history.txt	13.09.2022 9:05	Текстовый докум...	65 КБ
 Install.exe	13.09.2022 9:05	Приложение	3 527 КБ

3. В приветственном окне нажать «Далее».

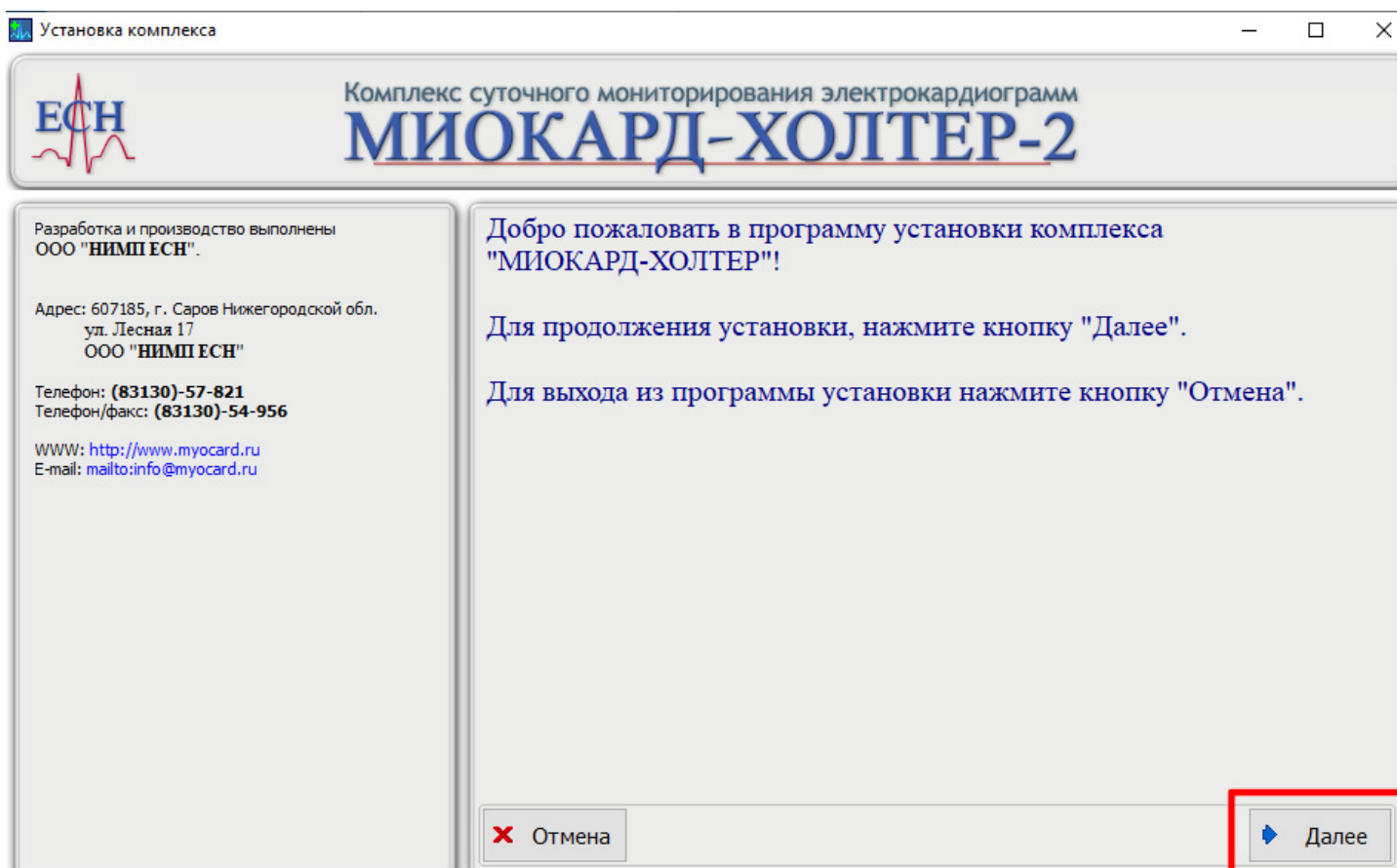

4. В следующем окне выбрать путь установки программы на жестком диске или оставить путь по умолчанию и нажать «Далее»

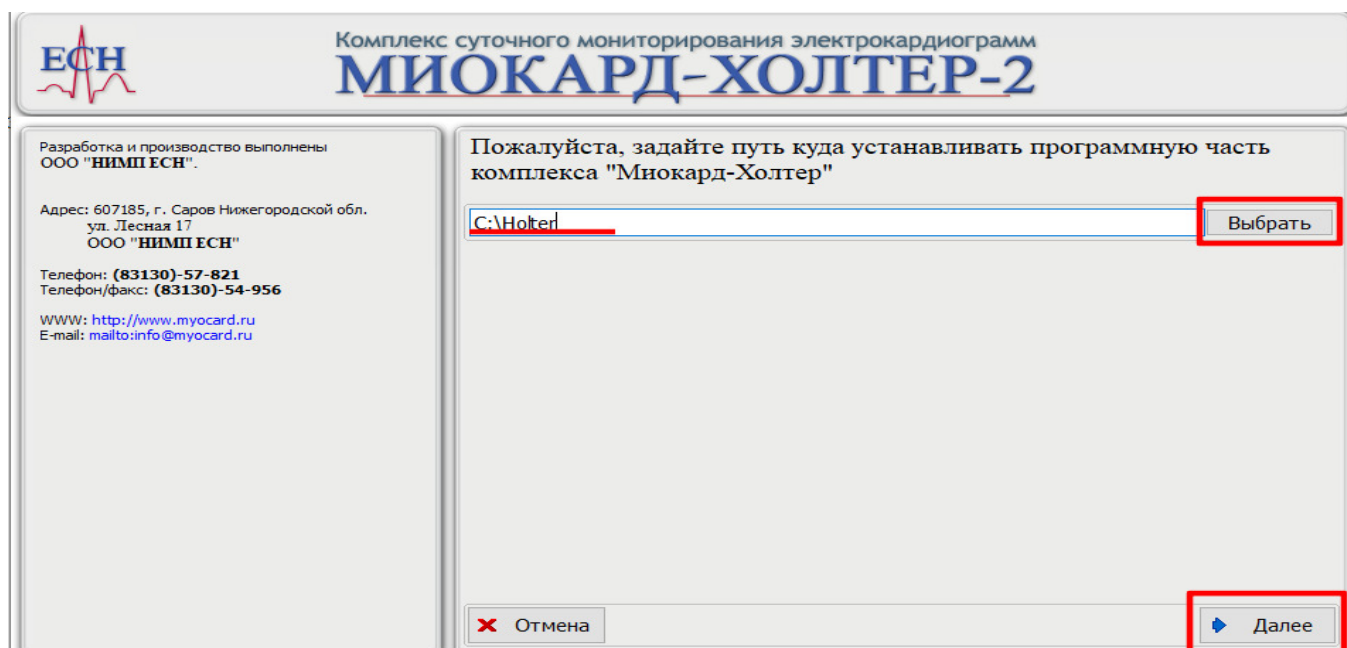

5. Ввести полностью данные медучреждения, выбрать тип регистратора и ввести заводские номера интерфейсного блока и регистратора и нажать «Далее». Если у вас ранее была старая версия регистратора МИОКАРД-ХОЛТЕР или у вас есть необходимость в чтении уже считанных исследований с такого регистратора, то вам необходимо поставить соответствующую галочку при выборе вида регистратора.

ВНИМАНИЕ! После установки ПО данные **невозможно отредактировать** внутри программы, редактирование возможно выполнить только с помощью **переустановки ПО МИОКАРД-ХОЛТЕР 2**.

ВНИМАНИЕ! В **одно** окошко вводится **один** заводской номер регистратора.

ЕЧН Комплекс суточного мониторинга электрокардиограмм
МИОКАРД-ХОЛТЕР-2

Разработка и производство выполнены ООО "НИМП ЕЧН".

Адрес: 607185, г. Саров Нижегородской обл.
ул. Лесная 17
ООО "НИМП ЕЧН"

Телефон: (83130)-57-821
Телефон/факс: (83130)-54-956

WWW: <http://www.myocard.ru>
E-mail: <mailto:info@myocard.ru>

Пожалуйста, введите наименование медицинского учреждения

Введите адрес медицинского учреждения

Выберите тип регистратора

Миокард-Холтер 2 BPlab combi

Только программа обработки. Не подразумевает установку регистраторов. ЭКГ + АД BpLAB

Лицензия для:

введите номер интерфейсного блока/USB-ключа

введите номера регистраторов

в каждой ячейке вводить номер только одного регистратора. Необходимо ввести не менее одного номера

Отмена Назад Далее

Выберите тип регистратора

Миокард-Холтер 2 BPlab combi

Только программа обработки. ЭКГ + АД BpLAB

Типы поддерживаемых форматов ЭКГ

☐ Миокард-Холтер

☒ Миокард-Холтер 2

☐ BPlab

Применить

в каждой ячейке вводить номер только одного регистратора. Необходимо ввести не менее одного номера

6. Внимательно читать всплывающие таблички и следовать рекомендациям в них.

Получение лицензии на ПО «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»

1. После установки ПО «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2» в корневом каталоге папки с установленной программой будет сформирован файл **license_tmn.dta**.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ib_util.Dll	15.02.2017 8:57	Расширение при...	8 КБ
icudt30.Dll	15.02.2017 8:52	Расширение при...	1 532 КБ
icuin30.Dll	15.02.2017 8:51	Расширение при...	408 КБ
icuuc30.Dll	15.02.2017 8:51	Расширение при...	660 КБ
info.dta	11.10.2021 14:02	Файл "DTA"	1 КБ
IssueCache.xml	18.10.2021 16:32	Документ XML	1 КБ
iwr.exe	31.03.2021 16:45	Приложение	2 224 КБ
LIC.dll	21.11.2019 10:23	Расширение при...	334 КБ
license_tmn.dta	11.10.2021 14:02	Файл "DTA"	1 КБ
LicenseDLL.dll	30.04.2019 15:58	Расширение при...	2 133 КБ
Log.txt	03.06.2022 13:38	Текстовый докум...	0 КБ
MdSmadLib.dll	27.12.2016 5:16	Расширение при...	477 КБ
Miocard12.exe	13.11.2020 12:40	Приложение	20 239 КБ
msvc80.Dll	23.09.2005 0:05	Расширение при...	536 КБ
msvcr80.Dll	23.09.2005 0:05	Расширение при...	612 КБ
nachhol.exe	17.05.2022 14:30	Приложение	2 953 КБ
NewRecord.bin	09.11.2021 16:08	Файл "BIN"	1 КБ
Obge.exe	08.12.2019 18:22	Приложение	2 194 КБ
obrhol.exe	09.06.2022 16:45	Приложение	4 096 КБ
obrst.exe	14.12.2011 16:44	Приложение	445 КБ
Operation.log	09.11.2021 16:14	Текстовый докум...	5 КБ

2. Для регистрации программы Вам необходимо выслать файл **license_tmn.dta** по электронной почте на адрес esn@sar.ru. Для этого необходимо войти в вашу электронную почту, написать новое письмо. В поле «Тема» указывается **«Регистрация программы МИОКАРД-ХОЛТЕР-2, город и полное наименование учреждения»** в текста письма указать **ФИО, контактный телефон**.

Пример темы: Регистрация программы МИОКАРД-ХОЛТЕР-2, Нижегородская обл. г.Саров, КБ-50

ВНИМАНИЕ! Без всех корректно введенных данных в ходе установки или при некорректно заполненном поля «Тема» в письме, лицензия не отправляется.

3. В ответном письме Вы получите файл **license.dta**, который нужно будет скопировать в корневой каталог папки с установленной программой, откуда вы брали файл **license_tmn.dta**.

ВНИМАНИЕ! Нельзя изменять имя файла лицензии **license.dta**. Нельзя удалять и перемещать файл **license_tmn.dta** при получении лицензии.

icuin30.Dll	15.02.2017 8:51	Расширение при...	408 КБ
icuuc30.Dll	15.02.2017 8:51	Расширение при...	660 КБ
info.dta	11.10.2021 14:02	Файл "DTA"	1 КБ
IssueCashe.xml	18.10.2021 16:32	Документ XML	1 КБ
iwr.exe	31.03.2021 16:45	Приложение	2 224 КБ
LIC.dll	21.11.2019 10:23	Расширение при...	334 КБ
license.dta	12.10.2021 11:56	Файл "DTA"	1 КБ
license_tmn.dta	11.10.2021 14:02	Файл "DTA"	1 КБ
LicenseDLL.dll	30.04.2019 15:58	Расширение при...	2 133 КБ
Log.txt	03.06.2022 13:38	Текстовый докум...	0 КБ
MdSmadLib.dll	27.12.2016 5:16	Расширение при...	477 КБ
Miocard12.exe	13.11.2020 12:40	Приложение	20 239 КБ
msvcp80.Dll	23.09.2005 0:05	Расширение при...	536 КБ
msvcr80.Dll	23.09.2005 0:05	Расширение при...	612 КБ
nachhol.exe	17.05.2022 14:30	Приложение	2 953 КБ
NewRecord.bin	09.11.2021 16:08	Файл "BIN"	1 КБ
Obge.exe	08.12.2019 18:22	Приложение	2 194 КБ

ВНИМАНИЕ! Некоторые антивирусы ложно считают программы «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2» и «МИОКАРД-12» вирусом. Необходимо добавить папку с программой в исключения. Стоит особенное внимание уделить файлу «LicenseDLL.dll» в программе «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2» и «SDecision.dll» в программе «МИОКАРД-12», т.к. эти файлы наиболее часто удаляют антивирусные программы. Если эти файлы удалены, необходимо заново их переписать из дистрибутива. Ниже приведен пример добавления папки программы в исключения для антивируса AVAST.


Для этого необходимо запустить антивирус Avast, откройте подменю Исключения (вкладка Общие) и нажмите Обзор, после чего выберите папку программы (напротив папки установите галочку, в окне выберите области, вы можете выбрать сразу не одну папку) и она появится в списке исключений.

Обновление ПО «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2»


ВНИМАНИЕ! Если Ваша версия программы ниже, чем 8.1 то выполните установку актуальной версии программы с сайта по инструкции.

Начиная с версии 8.1 для «МИОКАРД-ХОЛТЕР 2» добавлен механизм автоматического обновления программ.


1. Выбрать в меню «Настройки».

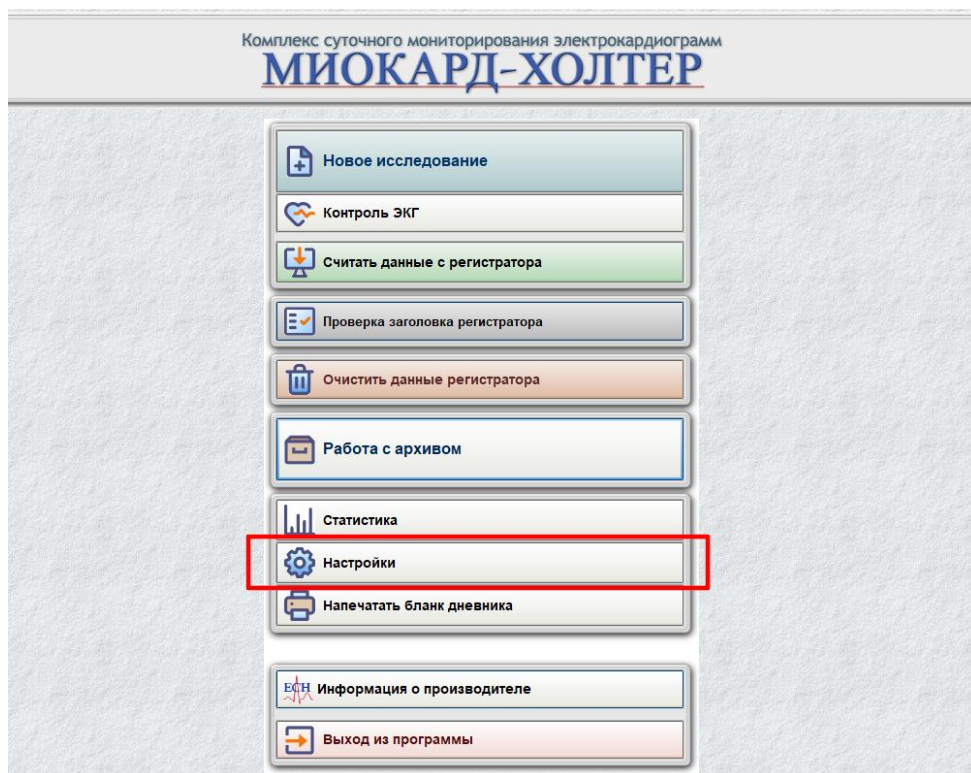

2. Нажать «Обновление версии программы».

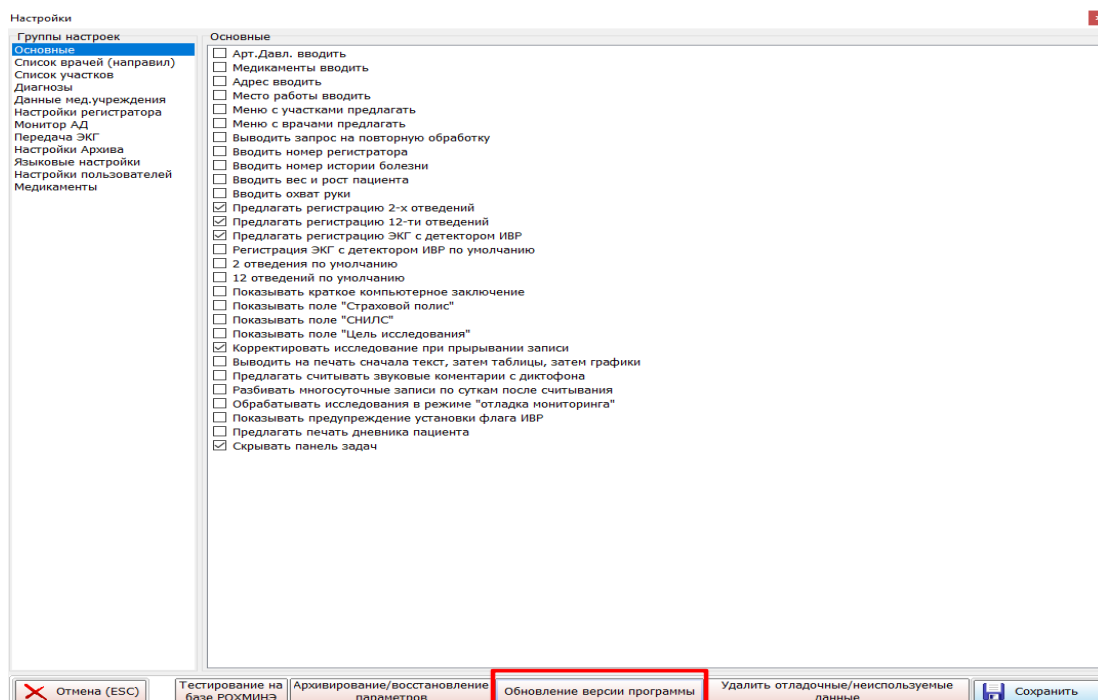


3. Выбрать источник обновления сервер ООО “НИМП ЕСН” и нажать кнопку «Начать обновление».

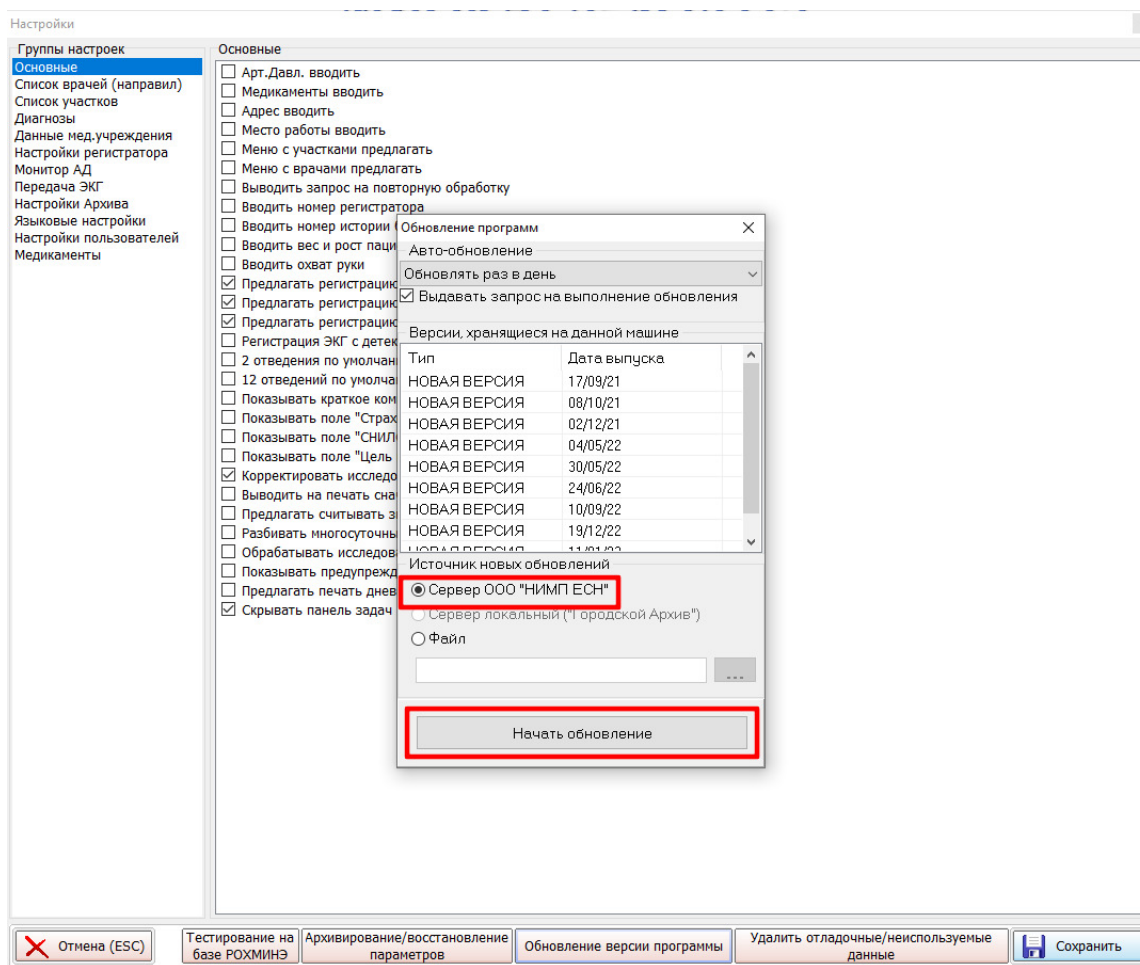


4. Далее действуйте по всплывающим окнам с командами «установить», «подтвердить». В случае необходимости подтвердить уведомление об установке программы от брандмауэра Windows.

В случае если на рабочем компьютере нет подключения к Интернету:

1. На компьютере имеющем доступ к интернету зайдите на сайт www.myocard.ru в раздел «ПРОГРАММЫ» и скачайте архив обновления программы МИОКАРД-ХОЛТЕР 2.
2. На сайте выбрать вкладку «ПРОГРАММЫ»

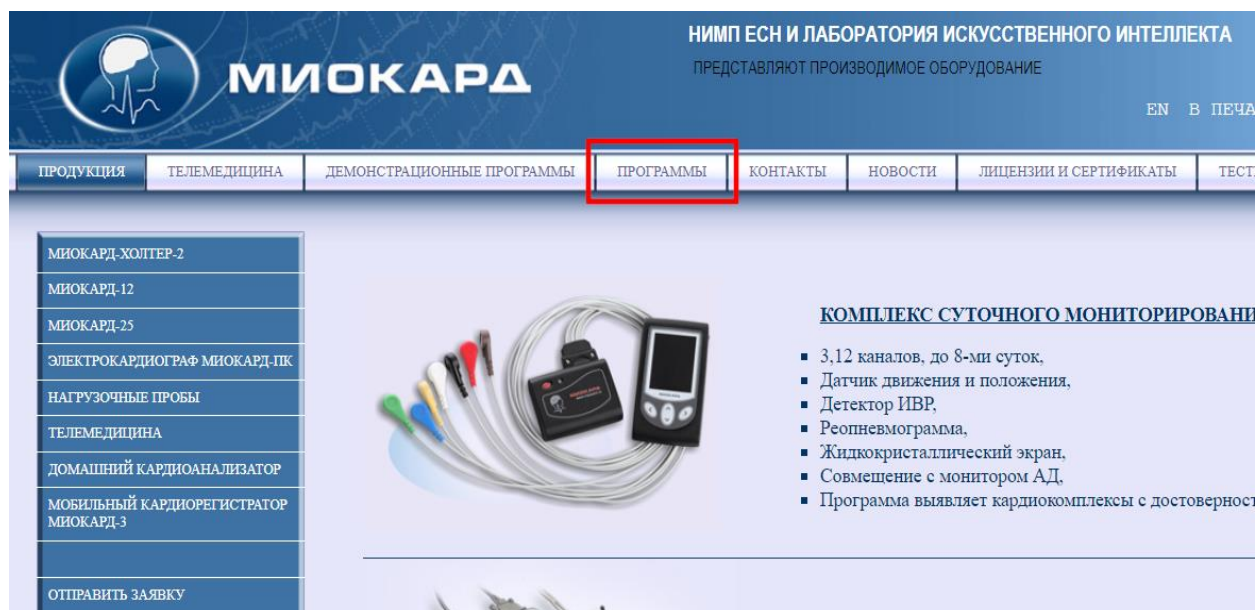

3. Далее скачать архив обновления программы МИОКАРД-ХОЛТЕР 2.

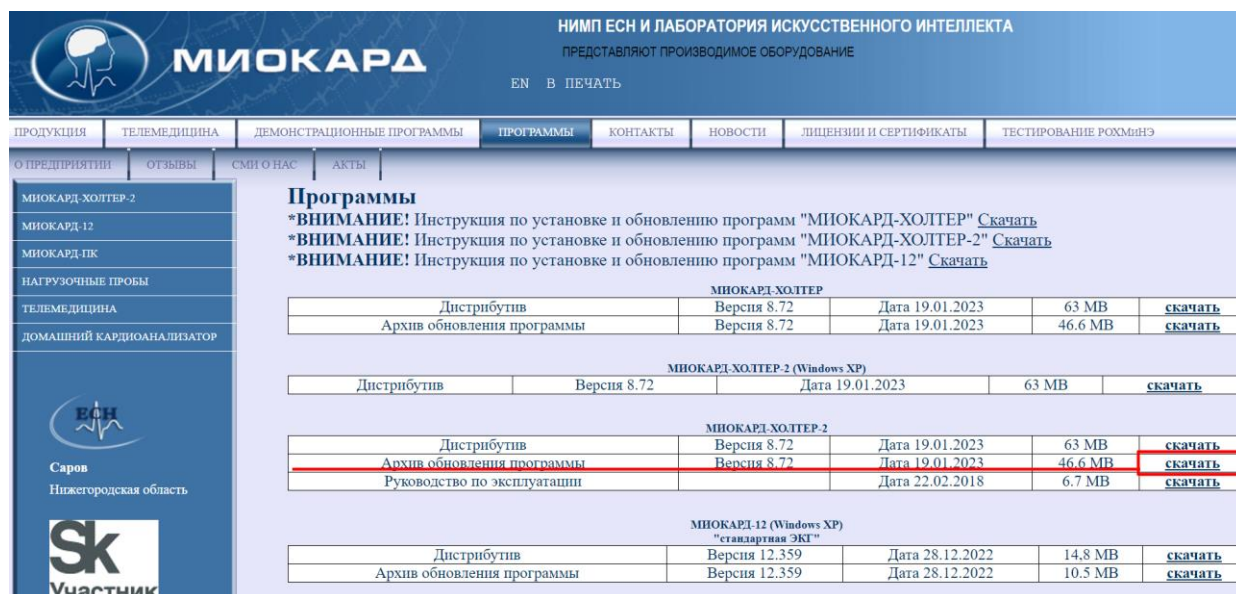

4. Скопировать архив обновления программы на диск рабочего компьютера.
5. Скопируйте из архива папку R(xxxxxx) из скачанного архива обновления и вставьте в папку «backur» в корне установленной программы МИОКАРД-ХОЛТЕР 2.
6. Затем зайдите в программу МИОКАРД-ХОЛТЕР 2 в «НАСТРОЙКИ», «Обновление версии программы», правой кнопкой мыши нажмите на новую версию (самую нижнюю в таблице версий), и левой кнопкой мыши выберите «Установить данную версию».