

Установка и Обновление программ «Миокард-Холтер»

Зайдите на сайт www.myocard.ru в раздел «программы» и скачайте дистрибутив Миокард-Холтер:

1) Если Ваша версия программы Миокард-Холтер ниже, чем 8.1 то установите ее. В ходе установки программы Миокард-Холтер необходимо вводить наименование медицинского учреждения, адрес медицинского учреждения (область, город, улица, номер дома), выбрать тип регистратора, ввести номер интерфейсного блока, номера регистратора(ов), (вводимые данные после установки программы изменить нельзя).

После установки программы «Миокард-Холтер» в корневом каталоге установленной программы будет сформирован файл license_tmn.dta. Для регистрации программы Вам необходимо выслать этот файл по электронной почте на адрес esn@sar.ru. Для этого необходимо открыть браузер интернета, войти в электронную почту, написать новое письмо. В поле Тема указывается: «Регистрация программы Миокард-Холтер-2, город и полное наименование учреждения». Пример (Регистрация программы Миокард-Холтер-2, г.Саров, КБ-50), в поле Письмо указать ФИО, контактный телефон. (В ответном письме Вы получите файл License.dta, который нужно будет скопировать в корневой каталог установленной программы.

Лицензия привязана к определенному ПК и наименованию учреждения, поэтому если предполагается установка ПО на несколько ПК, то лицензию нужно будет получать на каждое рабочее место. В этом случае при посылке файла license_tmn.dta в поле Темы также укажите номер ПК или номер кабинета врача, и т.д.

ВАЖНО! Без введенных данных в ходе установки, при некорректно заполненном поле Тема, лицензия не отправляется.

Внимание! Рекомендуем новые версии программы ставить не на место работающей версии, а рядом, чтобы всегда можно было вернуться к работе на предыдущей программе.

2) Если Ваша версия программы Миокард-Холтер выше 8.1, то скачайте только архив обновлений.

В случае если на рабочем месте нет подключения к Интернету, нужно скачать файл архива обновления на компьютере имеющем доступ к интернету, скопировать его на диск рабочего компьютера. Скопируйте папку R(xxxxxx) из скачанного архива обновления и вставьте в папку backup в корне программы Миокард-Холте. Затем зайдите в программу Миокард-Холтер в «настройки», «обновление версии программы» правой кнопкой мыши нажмите на новую версию (самую нижнюю в таблице), и левой на «установить данную версию».

3) Начиная с версии программы Миокард-Холтер 8.1 для «Миокард-Холтер» добавлен механизм автоматического обновления программ. Для этого необходимо войти в меню «Настройки» и нажать кнопку «Обновление версии», выбрать источник обновления сервер ООО «НИМП ЕСН» и нажать кнопку «Начать обновление».

ВАЖНО!

Некоторые антивирусы ложно считают программы «Миокард-Холтер-2» и «Миокард-12» вирусом. Необходимо добавить папку с программой в исключения. Стоит особенное внимание уделить файлу «LicenseDLL.dll» в программе «Миокард-Холтер-2» и «SDecision.dll» в программе «Миокард-12», т.к. эти файлы наиболее часто удаляют антивирусные программы. Если эти файл удалены, необходимо заново его переписать из дистрибутива. Ниже приведен пример добавления папки программы в исключения для антивируса AVAST.

Для этого необходимо запустить антивирус Avast, откройте подменю Исключения (вкладка Общие) и нажмите Обзор, после чего выберите папку программы (напротив папки установите галочку в окне выберите области, вы можете выбрать сразу не одну папку) и она появится в списке исключений.